

Informationen für Einsender zur Blutentnahme bei Liquid Biopsy-Diagnostik

Empfohlene Verbrauchsmaterialien

| Artikel | Beschreibung | Firma | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| PAXgene ccfDNA Blutentnahmesystem | Blutabnahme-Röhrchen | Qiagen Vertrieb über BD Heidelberg | 768165 |
| Venofix Safety (G21 0,8 x 19mm) | Blutabnahme-Kanüle | B Braun Melsungen AG | 4056504-01 |
| Blutkultur-Adapter Universal | Blutabnahme-Adapter | Sarstedt AG & Co | 14.1209 |
| Schutzgefäß mit Verschluss | Versandbox | Sarstedt AG & Co | 78.573 |

- Verwenden Sie zur Blutabnahme ein Butterfly-System mit großem Nadeldurchmesser (z.B. Venofix Safety Kanüle G21)
→ Bitte beachten sie die Standard-Arbeitsanleitung zur peripheren venösen Blutentnahme für die labormedizinische Diagnostik
- Halten Sie den Patientenarm während der Blutabnahme in einer abwärts gerichteten Position, um einen Rückfluss zu vermeiden (die Röhrchen enthalten chemische Zusatzstoffe!)
- Achten Sie bitte auf das Haltbarkeitsdatum der verwendeten Röhrchen!
- Befüllen Sie mindestens zwei PAX-Röhrchen pro Patient **vollständig** mit Blut (9ml)
- Öffnen Sie den Stauschlauch sobald das Blut in das Röhrchen fließt
- Entfernen Sie das Röhrchen vom Adapter und invertieren Sie es unverzüglich 10x
- Die Röhrchen nicht einfrieren
- Die PAX-Röhrchen können bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank gelagert und bei Raumtemperatur verschickt werden
- Versenden Sie die Probe schnell, stabil und sicher in einem Schutzgefäß
- Der Versand mit einem Kurierdienst ist empfehlenswert
- Bitte kündigen Sie den Versand Ihrer Proben an:
Molekularpathologie 0711-8101 5756 oder per E-Mail:
Molekularpathologie@rbk.de; annette.staiger@ikp-stuttgart.de
- Für die Abrechnung benötigen wir den ausgefüllten Anforderungs- und ggf. einen Überweisungsschein
- Bitte geben Sie auf dem Anforderungsschein die Primärmutation an
- Um eine ausreichende Plasmamenge zu erhalten ist es hilfreich, wenn die Patienten vor der Blutabnahme ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen

Auf Nachfrage stellen wir Ihnen für erste Untersuchungen gerne PAX-Röhrchen zur Verfügung.